

NOTICE

Masque Barrière AFNOR SPEC S76-001:2020


Le présent masque barrière de confection artisanale répond aux exigences minimales de fabrication du référentiel AFNOR SPEC S76-001. Il permet de constituer une barrière de protection contre une pénétration virale dans la zone bouche et nez de l'utilisateur du masque ou d'une personne se trouvant à proximité. Il protège cette zone contre tout contact avec les mains.

Composition

Tissu 100% coton bi couche. *Il est recommandé à l'utilisateur du masque de placer une couche supplémentaire (exemple : papier essuie-tout) dans le pli intérieur du masque.*

Utilisation

A laver impérativement avant sa première utilisation 30mn minimum, température de lavage de 60°C

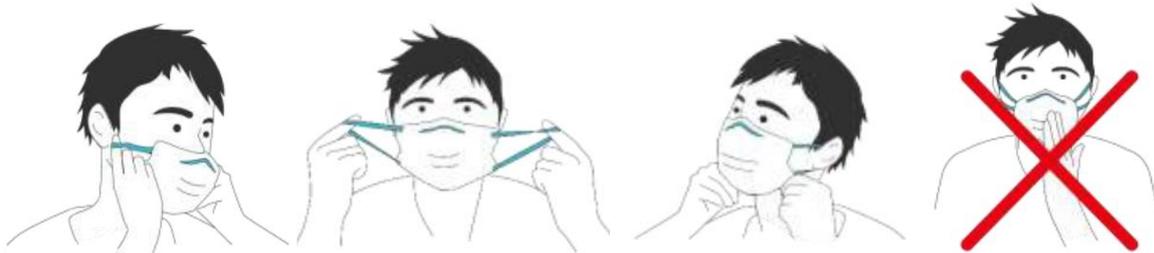

Se laver les mains avant toute manipulation du masque. Pour le placer sur le visage, tenir le masque par les élastiques. Abaisser le bas du masque barrière sous le menton

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains.

Ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

Le port du masque est limité à une demi-journée (4h)

Pour une réutilisation de masque, s'assurer que celui-ci ait bien été lavé.

Instructions d'entretien

Le masque barrière est conçu pour être réutilisable. Il **doit être lavé avant sa première utilisation (30mn minimum avec une température de lavage de 60°C)** et à chaque qu'il est souillé, mouillé, mal positionné sur le visage ou s'il est porté plus de 4h.

Résiste à 5 cycles de lavage minimum.

AVERTISSEMENT Le masque barrière n'exonère absolument pas l'utilisateur de l'application des gestes barrières complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels.

Obligatoire : Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).